

### **Werte der Magic Lenses:**

100 % weiche Kontaktlinsen (2-Monatslinsen)  
Krümmungsradius (BC): 8,7 mm  
Wassergehalt: 38,5 %  
Durchmesser: 13,9 mm  
Center Thickness: 0,24 mm  
Light Transmission: 93%  
Brechungskoeffizient: 1,437  
O<sup>2</sup>Durchlässigkeit: 8

**Original Magic Lenses sind nicht für den Straßenverkehr geeignet. Die Linsen dürfen nicht beim Führen eines Fahrzeugs getragen werden!!!!**

### **Trageprozess**

1. Kontaktlinsenträger-Neulinge: Bitte befolgen Sie die professionellen Instruktionen, die Ihr Optiker/Augenarzt Ihnen für das Tragen empfiehlt genauestens. Sie sollten die Kontaktlinsen am ersten Tag nicht länger als vier Stunden tragen. Erhöhen Sie die Tragezeit um jeweils 2 Stunden pro Tag.
2. Wenn Sie die Linsen mehrere Tage nicht getragen haben, beginnen Sie wieder mit vier Stunden Tragezeit pro Tag und erhöhen jeweils um 2 Stunden pro Tag.
3. Die Tragezeit richtet sich nach Konstitution, Kondition der Augen, Lebensumstände und Job und die Gebrauchsgewohnheit.

### **Tägliches Reinigen und Pflege der Kontaktlinsen**

1. Nachdem Sie die Kontaktlinse in die Handfläche gelegt haben, nehmen Sie etwas Reinigungslösung speziell für Kontaktlinsen in die Handfläche.
2. Reiben Sie vorsichtig mit der Fingerspitze 30 Sekunden von vorne nach hinten über die Linse.
3. Spülen Sie die Linse mit für Kontaktlinsen geeigneter Reinigungsflüssigkeit oder Kochsalzlösung ab.

### **BEMERKUNG:**

Wenn Sie die Linsen reinigen, reiben Sie nicht im Kreis über die Linse, sondern immer von einer Richtung in die andere.

Bitte drücken oder ziehen Sie nicht fest an der Linse.

Es wird eine All-in-one-Lösung speziell für Kontaktlinsen empfohlen.

---

Vor Gebrauch: Sie müssen immer frische Kontaktlinsenflüssigkeit nehmen, damit die Geschmeidigkeit und Optik der Linsen erhalten bleibt.

Nach Gebrauch: Entfernen Sie sorgfältig alle Ablagerungen von den Kontaktlinsen bevor Sie sie in die Reinigungsflüssigkeit geben.

1. Spülen Sie die Aufbewahrungsbox aus und füllen Sie sie mit frischer Reinigungsflüssigkeit.
2. Auf den Deckeln, der Aufbewahrungsboxen steht ein L für links und ein R für rechts. Bitte legen Sie die Linse aus dem rechten Auge in die Box mit der Aufschrift R und die Linse aus dem linken Auge in die Box mit der Aufschrift L und verschließen Sie die Deckel sorgfältig.
3. Wenn Sie die Linsen regulär tragen, wird empfohlen, die Linsen mit einer Proteinlösungs-Tablette einmal pro Woche zu reinigen.

### **BEMERKUNG:**

Wenn Sie die Deckel zuschrauben, versichern Sie sich vorher, ob die Linse richtig in der Box liegt. Sie müssen die Deckel sauber halten und immer frische Reinigungslösung benutzen.

### **Pflegehinweise zum Gebrauch:**

Bitte prüfen Sie vor Gebrauch, ob die Linsen in Ordnung sind. Benutzen Sie sie keinesfalls, wenn Sie gerissen oder anderweitig beschädigt sind.

Waschen Sie sich die Hände und trocken sie sorgfältig ab, bevor Sie die Linsen anfassen, da sich ansonsten Schmutzpartikel auf den Linsen absetzen könnten.

Legen Sie einen Spiegel vor sich auf den Tisch. So können Sie vermeiden, dass Ihnen die Linse vom Finger fällt. Legen Sie eine Linse auf Ihren Zeigefinger und ziehen mit den Fingern der freien Hand das Augenlid leicht nach oben. Mit dem Mittelfinger der Hand, in der Sie die Linse halten, ziehen Sie die Haut unter dem Auge leicht nach unten. So ist das Auge weit geöffnet. Dann setzen Sie die Linse ins Auge. Verfahren Sie mit der zweiten Linse genauso.